

各位


栃木精工株式会社
栃木市平柳町 2 丁目 1 番 5 号

「TSK STERiJECT LDS ニードル」ご使用上のお願い（第 2 版）

1. 製品情報

種 別：機械器具 74 医薬品注入器
一般的名称：単回使用注射用針（JMDN コード：30889000）
販 売 名：TSK STERiJECT LDS ニードル

2. 本製品の構成

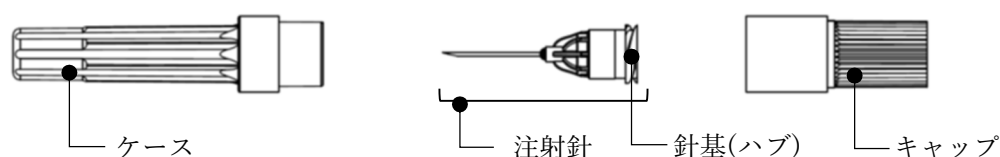

3. ご使用に際して

ご使用前に添付文書を必ずお読みください。
特に＜使用方法に関連する使用上の注意＞につきましては熟読をお願いいたします。

4. ご使用时注意していただきたいこと

次ページの【使用方法及び注意のお願い】をご確認ください。

5. 取り扱い動画について

URL <https://youtu.be/0humsJV7NEg>


QR コード




【使用方法及び注意のお願い】

1) 注射針の針基（ハブ）と注射筒の筒先を確実に嵌合させてください。

※針基奥までしっかりと接続してください。

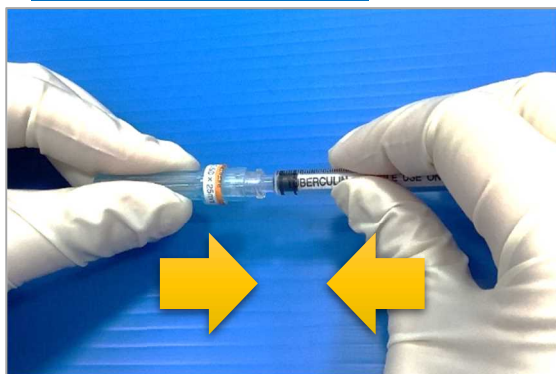


2) 針基と注射筒を接続後、ケースと注射針を上下に小刻みに揺らすようにしてケースと注射針の嵌合を緩めてから、針先とケースが接触しないよう真っすぐにケースを引き抜いてください。

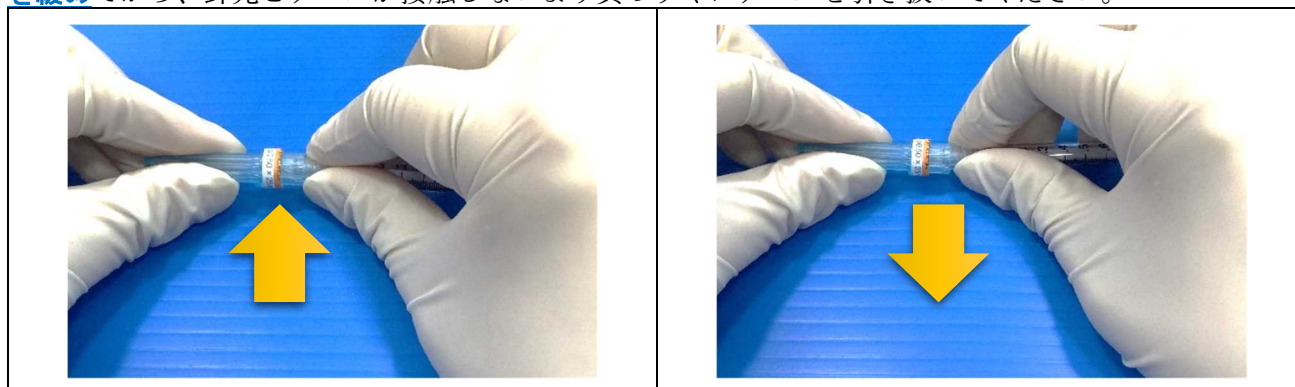**【針の曲がりが発生する可能性のある操作】**

ケースと注射筒を山折りに曲げ、ケースを斜めに引き抜きますと、針が曲がってしまう恐れがあります。

※このような操作は絶対に行わないでください。

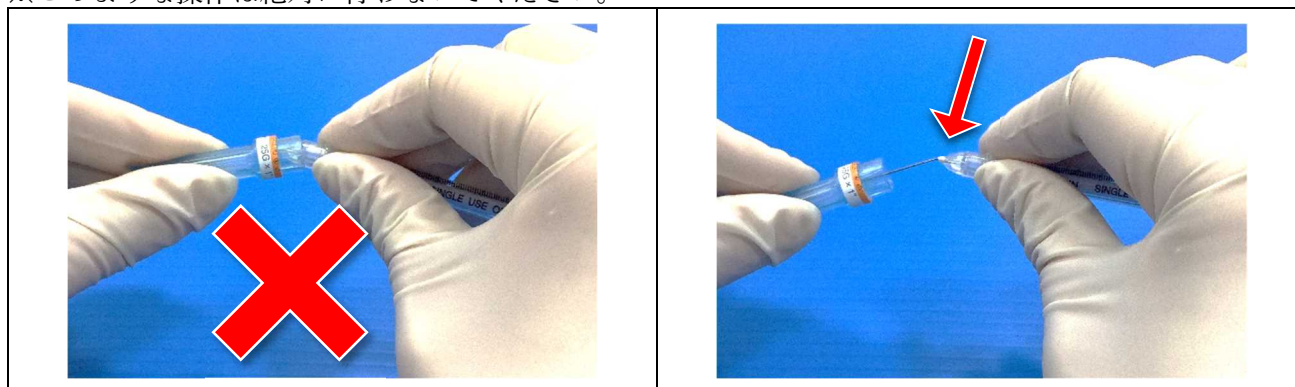**【本製品に対するお問い合わせ窓口】**

栃木精工（株）お客様相談室

TEL 0282-21-8882（受付時間：平日 9 時～17 時）