

3本入
日本製

洗淨用ブラシ

Chuclean® チャックリン

細かな
箇所まで
清掃する
器具がない!

汚れ、異物が
たまって
なかなか
除去できない

修理代も
高いし、自分で
メンテナンス
したい

チャックリンで問題を解決します!!

型番	適応チャック径	商品(※実寸サイズ)
BD160	φ1.60mm用	
BD235	φ2.35mm用	



栃木精工株式会社

TOCHIGI SEIKO Co.,Ltd.

洗浄用ブラシ
日本製 3本入

Chuclean®
チャックリン

製品案内は
コチラ
から!




■対象ハンドピース

- ・FG用:BD160
- ・CA,HP用:BD235

■使用方法

本品を水で濡らし、チャック部分に軽く挿入し止まったところで軽く前後に移動させて使用してください。

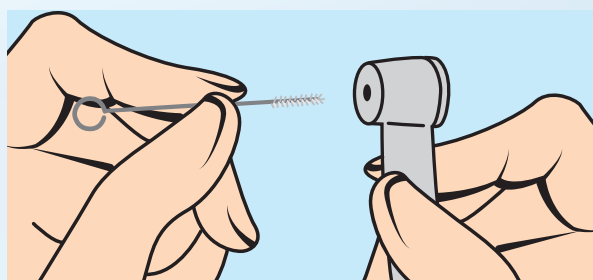

■使用上の注意

- ・人体への使用は行わないでください。本製品は、機器の洗浄用に製造されています。
- ・強い力でチャック部分に押し込まないでください。一部のメーカーの機器は内部に弱い部分があります。
- ・オートクレーブ滅菌等、熱を加えるような処置は行わないでください。
- ・ブラシの毛先が寝てきたり、抜けが見られる場合は新しいものと交換してください。
- 軸部によって内部を傷つける恐れがあります。
- ・軸を折り曲げて使用しないでください。先端が内部で引っ掛かり破損する原因となります。
- ・先端部が折れてしまった場合にも使用せず、新しいものと交換してください。
- ・ブラシを廃棄する際、患者に使用した機器内部を洗浄したものは、医療用廃棄物として処分してください。

販売名	商品コード	適応チャック径	入数
Chuclean®	BD160	φ1.60mm用	3個/箱
Chuclean®	BD235	φ2.35mm用	3個/箱



栃木精工株式会社

TOCHIGI SEIKO Co.,Ltd.

〒328-0012 栃木県栃木市平柳町2丁目1番5号
TEL.0282-27-1133(代表)